

MOBELI®


Mobilitet uten grenser. Mobile støttehåndtak.

VERDENSNYHET

Verdens første støttehåndtak som
kontinuerlig overvåker vakuumbstyrken
og sin egen festekraft.

EN STJERNE ER FØDT

Det nye QuattroPower støttesystemet
overgår alle forventninger og tiltrekker seg
stor oppmerksomhet under lanseringen.

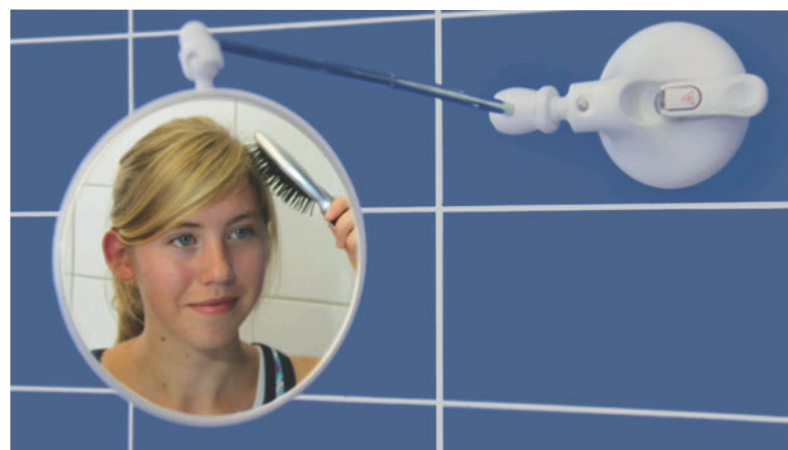

Mobelisystemet

Det patenterte System Mobile fra Roth tilbyr praktiske hjelpemidler for bevegelseshemmede og eldre mennesker. Testet gjennom en årrekke, har produktene både forenklet og sikret hverdagen for brukerne. De mobile sikkerhetshåndtakene tilpasses og fjernes raskt og enkelt. Vakuumputene har en diameter på 120 mm og festes ved et enkelt trykk på flate, ikke porøse underlag. Trykk hendelen ned og håndtaket er klar til bruk! Uten lim og uten bruk av drill.

Den nyskapende originalen

For nesten 10 år siden introduserte ROTH GmbH sitt mobile støttehåndtak på hjelpemiddelmarkedet. Oppfinnelsen er basert på det faktum at et vakuum (et nesten lufttomt rom) har en enorm styrke. Ingeniørene ved ROTH utviklet en serie av mobile støttehåndtak og andre praktiske hjelpemidler. Slik ble Mobelisystemet født.




Historisk oversikt: Utviklingen av Mobeli støttehåndtak.

MOBELI®

Mobilitet uten grenser. Mobile støttehåndtak.

Utviklerne bak Mobeli har selv arbeidet i mange år i hjelpemiddelbransjen. Med bakgrunn i denne erfaringen, har disse i de senere årene konstruert og produsert mange nyttige hjelpemidler for daglig bruk. Den korte avstanden mellom utvikling og produksjon i våre egne lokaler bidrar til den høye kvaliteten på alle produktene i Mobelisystemet.

Levende utvikling

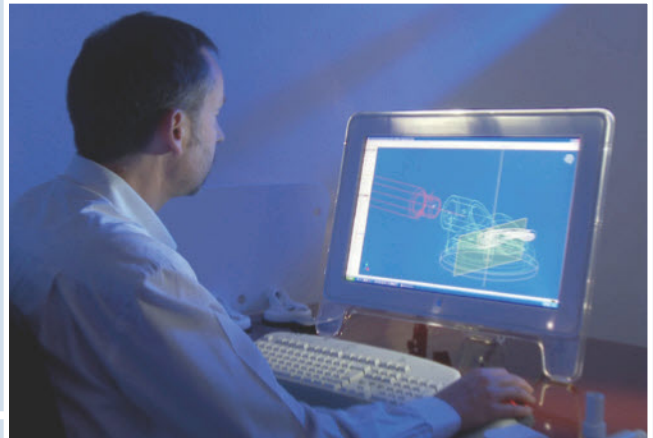

Råmaterialene vi bruker i våre støttehåndtak må ha en kvalitet som tilfredsstillende høye og kontinuerlig overvåkede krav.

Ekstremt motstandsdyktig og solid. Når vi velger råmaterialer til deler av PVC, krever vi kvalitets-sertifikater og løpende slitasjetester.

Det er materialene som teller



Etter utvikling, produksjon av prototyper og en rekke tester, kan produksjonen av Mobeli støttehåndtak begynne. Produksjonen foregår hos ROTH i Schwarzwald, sørvest i Tyskland. Vi bruker topp moderne maskiner og høyt kvalifisert teknisk personell.

Produksjon med perfektjon



Alle mobile støttehåndtak i Mobelisystemet som ROTH GmbH produserer, overvåkes under streng kontroll av tyske TÜV-Süd og følger kravene i standarden "93/42/EEC Medisinsk utstyr" - klasse 1.



Mobeli sikkerhetsindikator

Den nyeste utviklingen av Mobeli støttehåndtak er ganske enkelt revolusjonerende. Vi kaller det en verdenspremiere: Hendelen overvåker selv vakuumnivået og dermed også sin egen festekraft. Mobeli sikkerhetsindikator kontrollerer vakuumkraften kontinuerlig. Når varselhendelen er på sitt laveste, er festeevnen på sitt sterkeste - og håndtaket er trygt å bruke.

Dersom varselhendelen hever seg, vil den røde kanten bli synlig. Da må vakuumputene festes på nytt. Blinde og svaksynte kan enkelt kontrollere trykket ved å berøre varselhendelen.



MOBELI®

Mobilitet uten grenser. Mobile støttehåndtak.

Vi har utviklet det teleskopiske støttehåndtaket for å gjøre det mulig å bruke det uavhengig av flismønsteret. Gripehåndtaket har en standard diameter på 35 mm og 24 mm i den teleskopiske delen.

Teleskopisk gripehåndtak



Alle Mobeli støttehåndtak kan festes raskt og enkelt, uten bruk av verktøy. Like enkelt kan de demonteres og tas med på reise. Hurtiglåsen er laget av rustfritt stål, som alle andre metaldeler i Mobelisystemet.

Hurtiglås



Vakuumputene har en diameter på 120 mm og er laget av spesialgummi. De kan også brukes på svakt mønstrede fliser på vegger i bad og WC.

Vakuumputer



Mobeli sikkerhetshåndtak er spesielt godt egnet til bruk på reise: De er raske og enkle å montere og demontere. De har lav vekt. og tar opp lite plass i bagasjen.

Meget godt egnet på reise

